


**Mer tid
till Omsorg**

sensio

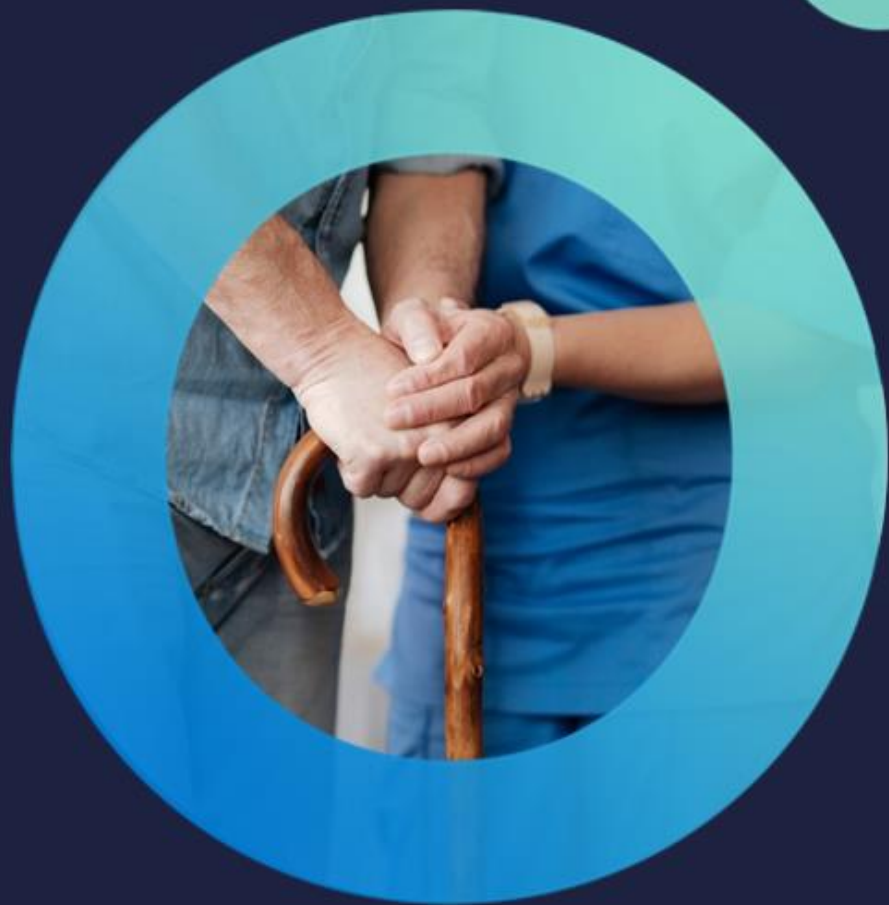

ADMINISTRATÖRUTBILDNING

Trygghetsskapande teknik

AGENDA

sensio^o

1. HÅRDVARA

1.1 PRODUKTER FRÅN SENSIO

2. MJUKVARA

2.1 PERSONALROLLER

2.2 VÄLFÄRDSPORTALEN - WEBBGRÄNSSNITT



1.1 PRODUKTER FRÅN SENSIO

SENSIOS LARMPRODUKTER



PRODUKTER OCH FUNKTIONER FRÅN SENSIO



LARMKLOCKA – aktiva larm

GPT5

- Larmklocka som brukaren **aktivt kan trycka** på för att påkalla hjälp.
- Kan bäras som **armband** alternativt **halsband**. Halsbandet är **strypsäkert**.
- Vattentät (IP67).
- Batteritid på **2 år** vid normal användning. Vid låg batterinivå skickas varning i Sensio Pocket.

WTRS 2 – används med lättrycksskal

- Larmklocka som brukaren **aktivt kan trycka** på för att påkalla hjälp.
- Kan bäras som **armband** alternativt **halsband**. Halsbandet är **strypsäkert**.
- Vattentät (IP67).
- Batteritid på **4 år** vid normal användning.
- Kan förses med **lättrycksskal**, som finns i två utförande.

sensio



DÖRRLARM

DC15

- **Dörrlarmet** är trådlöst.
- Används på bostadens ytterdörr **vid de tillfällen** när trygghetssensorn (passivt larm) **inte kan detektera** om brukaren går in i badrummet eller ut från bostaden. Gå även att använda på övriga allmänna dörrar om så önskas.
- Möjligt **individanpassa** viss tid på dygnet.
- **Förväntad batterilängd på 4 år** vid normal användning.



NÄRVAROMARERING VIA NFC-TAGG

- **Blippa telefonen** mot NFC-taggen för att skapa en **personbunden** närvaromarkering i bostaden.
- En lyckad närvaromarkering **utlöser vibrationer** och **ett bekräftelsemeddelande**.





ROOMMATES LARMFUNKTIONER

Trygghet genom hela omsorgsresan

sensio

RoomMate erbjuder ett stort antal funktioner i en och samma hårdvara för att kunna individuellt anpassa lösningen för att öka förutsättningarna att **”utan dröjsmål uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp”**

-  **Rest sig upp i säng – detektion** innan brukaren lämnar sängen
-  **Lämnat säng** – larmar **direkt** eller om inte brukaren kommer tillbaka
-  **Stol-** känner av om en brukare **lämnar en stol eller soffa**
-  **Dörr** – känner av både **in och utgång** ur rum, larmar direkt eller efter en viss tid
-  **För länge i badrummet** – larmar om brukaren varit i badrummet **onormalt länge**
-  **Rörelse i rum** - känner av om brukaren **går runt i rummet**
-  **Fall** – larmar vid både **långsamma och snabba fall**
-  **Brist på rörelse i sängen** – upptäcker om brukaren **rör sig för lite eller ej ligger i sängen**
-  **Ljud** - känner av om brukaren t.ex **ropar på hjälp**
-  **Tal** - **tvåvägs** kommunikation
-  **Digital tillsyn** – **avpersonifierad ljud och bild** med 3D-sensor

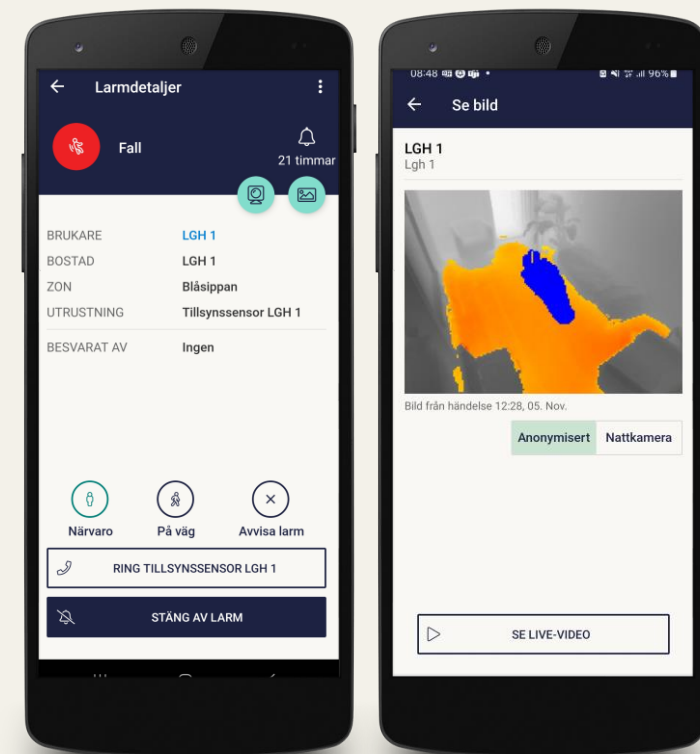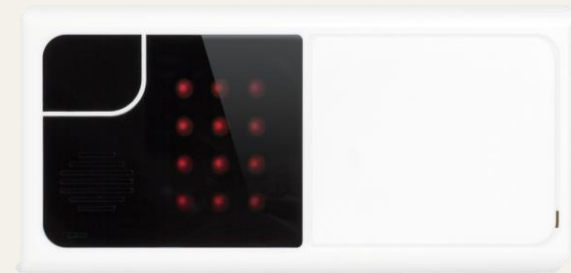

2. MJUKVARA



2.1 PERSONALROLLER

ADMINISTRATÖRER OCH OMSORGSPERSONAL



TVÅ OLIKA ROLLER


sensio

Administratörerna

jobbar i webbgränssnittet

Välfärdsportalen:

- Skapa nya användare
- Lägga till/ta bort och administrera larmtillbehör
- Ta fram rapporter/händelseloggar

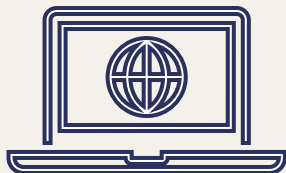

Omsorgspersonalen jobbar i appen **Sensio Pocket**

- Ta emot larm
- Kvittera larm
- Göra digital tillsyn
- Närvaromarkera sig



2.2 VÄLFÄRDSPORTALEN

WEBBGRÄNSSNITT FÖR ADMINISTRATION AV LARM





I VÄLFÄRDSPORTALEN KAN MAN

- Registrera anställda
- Lägga till utrustning och aktivera den på rätt brukare
- Aktivera larm
- Ta fram rapporter

Anna Administratör



LOGGA IN

sensio

Öppna webbläsaren och
skriv in web-adressen:
kommun.sensio.care

Logga in

sensio

Välkommen till

Logga in med

E-post eller användarnamn

anna.svensson@kommun.se

Lösenord

••••••••

☐ Fortsätt vara inloggad ⓘ

Logga in

[Glömt lösenord?](#)

Anna Administratör



LOGGA IN

sensio

Vid tillgång till flera verksamheter och roller:

1. Välj aktuell verksamhet
2. Välj aktuell roll

sensio

Välkommen Anna Svensson, logga in på lokationen

BJÖRKEN

Björken

Vinter

Natt Våning 2


Natt Våning 1

Administratör Björkens

Höst


Vår

Sommar

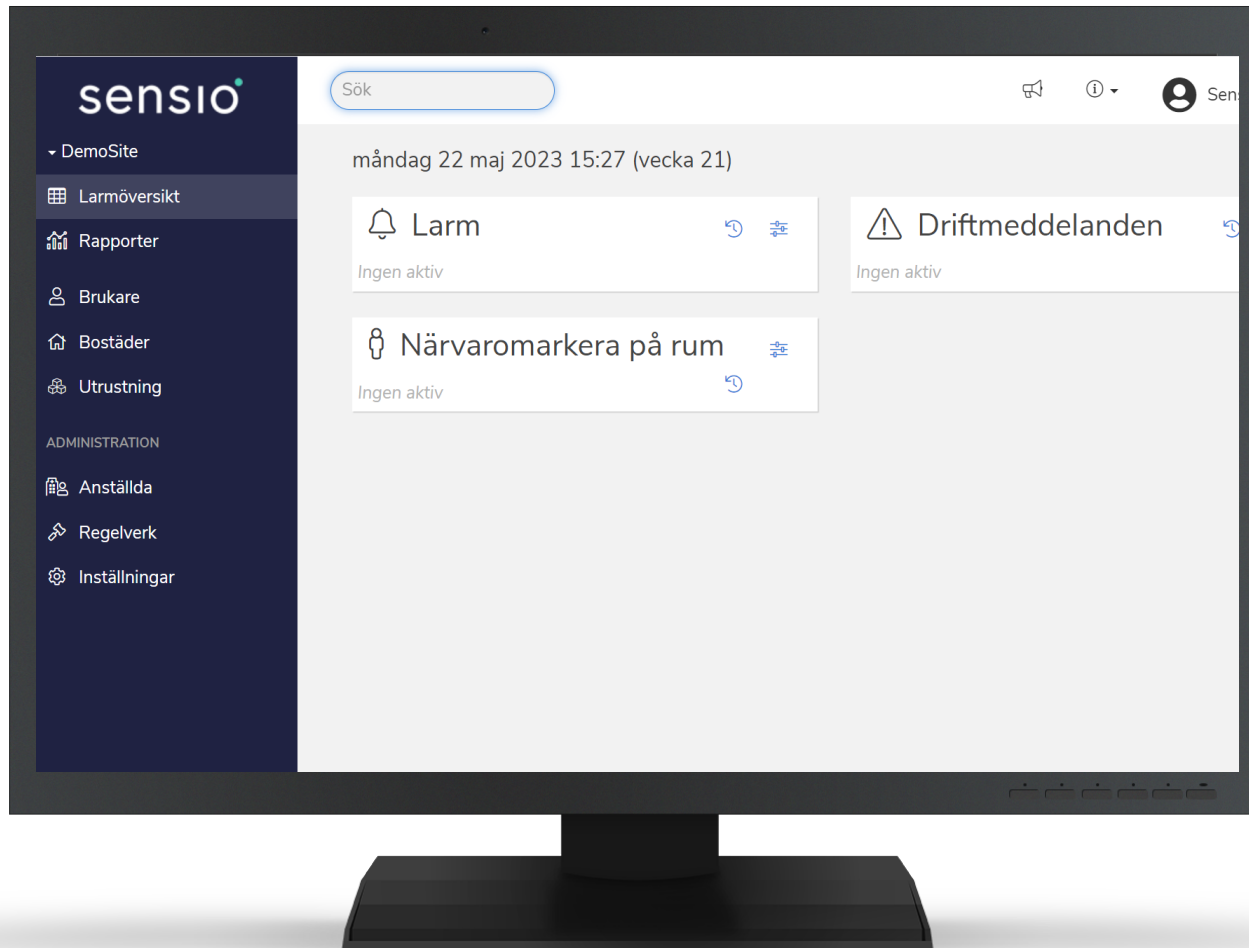




REGISTRERA ANSTÄLLDA

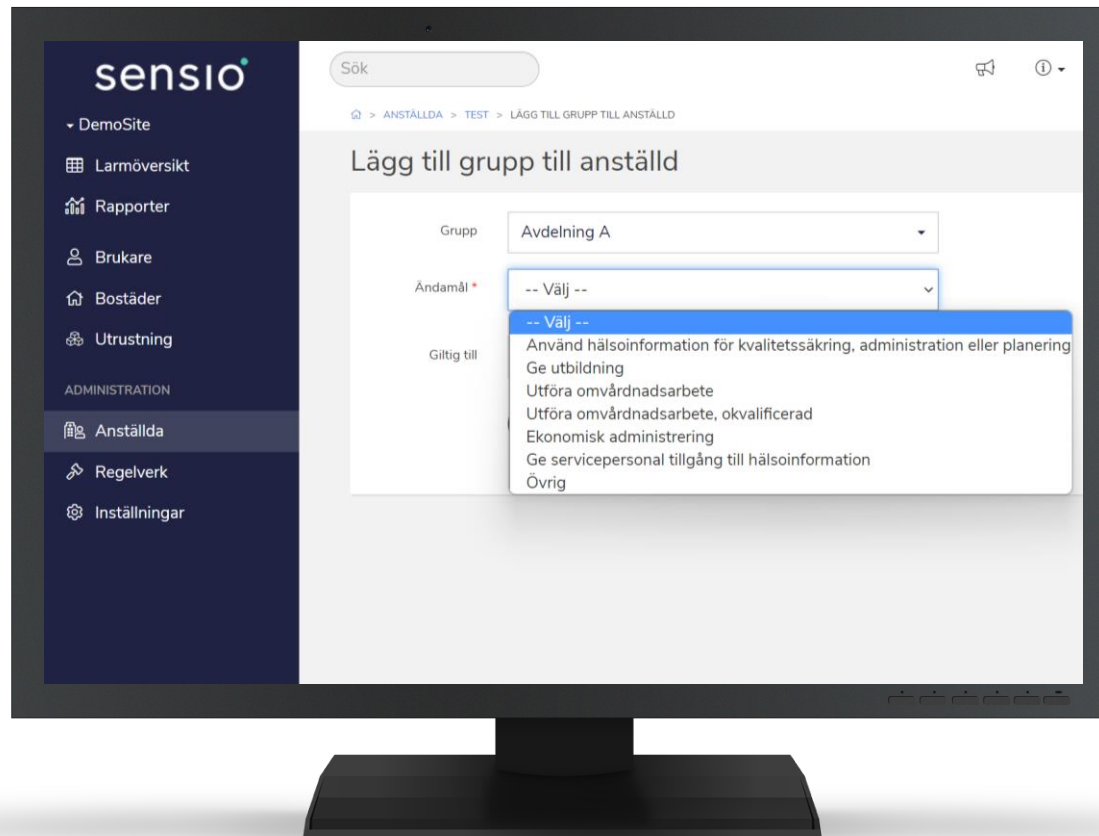

1. Gå till "Anställda" i huvudmenyn
2. Tryck "Ny anställd" (högst upp till höger)
3. Skriv in användaruppgifter
4. Lägg till användaren i anställda grupper
5. Om det är en administratör ska du välja det översta ändamålet. Om det är en tjänsteutövare ska du välja det tredje ändamålet.
6. Tilldela primär zon
7. **Spara**



LÄGG TILL UTRUSTNING I BRUKARENS LÄGENHET

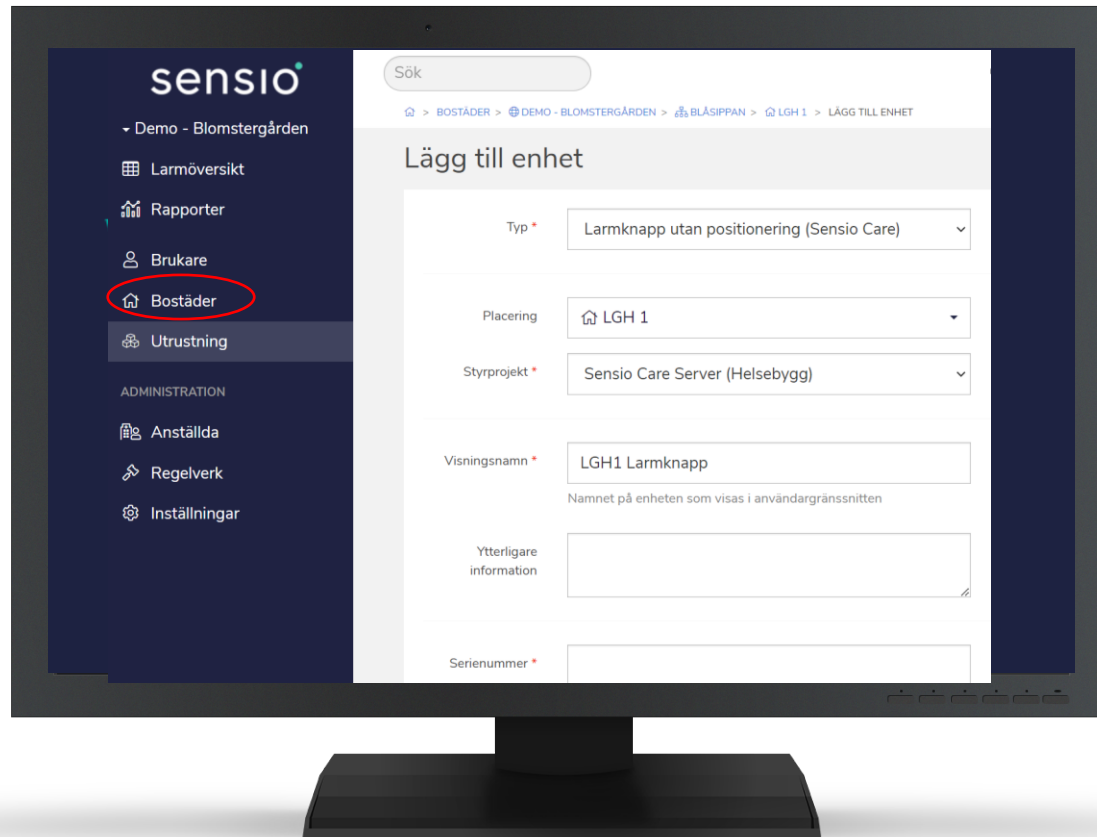

Lägg till larmklocka:

1. Gå in på Bostäder och välj aktuell bostad.

Klicka på "lägg till utrustning" och "enhet".

2. Välj typ av utrustning, i detta fall Larmknapp utan positionering.

3. Placering fylls i automatiskt om enheten läggs till från boendet

4. Styrprojekt fylls i automatiskt

5. Visningsnamn: Ange önskat namn enligt era benämningar för respektive produkt t.ex "LGH 1 Larmknapp"


6. Ytterligare information: Kan anges på begäran

7. Serienummer: Se baksidan av larmknappen

8. Spara!




TA FRAM STATISTIK KRING LARM sensio

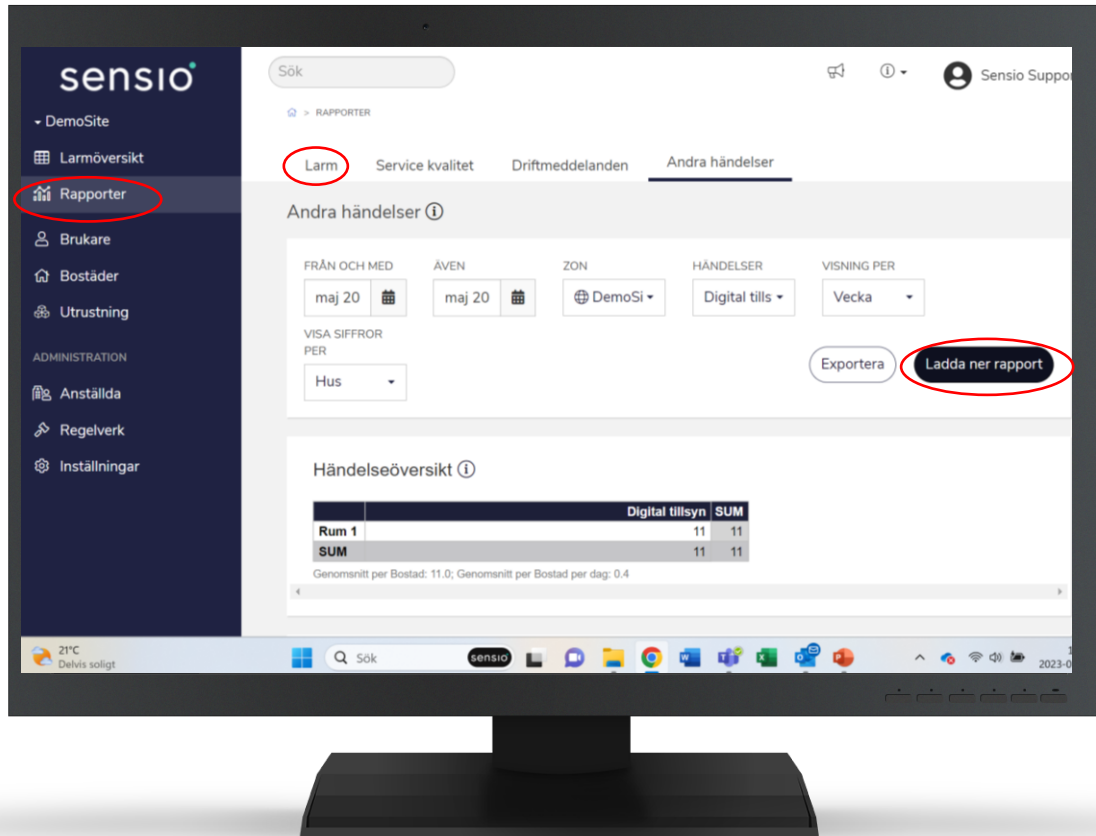

1. Gå till Rapporter
2. Tryck på Larm
3. Välj vilken loggtyp och filtrera därefter efter önskad filtrering.
4. Tryck på "ladda ner rapport"



TA FRAM HÄNDELSELOGGAR KRING LARM

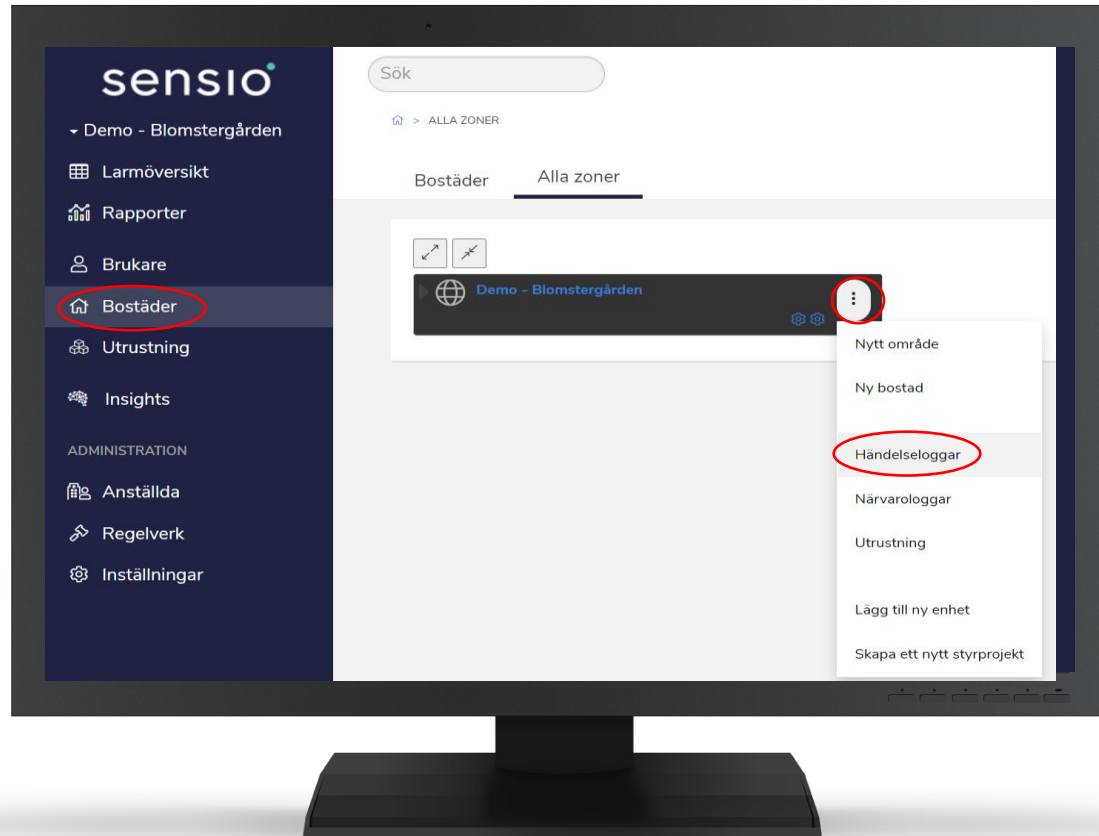

1. Gå till Bostäder
2. Tryck på den aktuella bostaden du önskar se händelseloggar ifrån alternativt på de tre prickarna under "Alla zoner" för att se händelseloggar över alla rum.
3. Välj vilken loggtyp och filtrera därefter efter önskad filtrering.



TA FRAM HÄNDELSELOGGAR KRING LARM

The screenshot shows the Sensio web application interface. On the left is a dark sidebar menu with the Sensio logo and navigation items: Demo - Blomstergården, Larmöversikt, Rapporter, Brukare, Bostäder, Utrustning, Insights, and an ADMINISTRATION section containing Anställda, Regelverk, and Inställningar. The main content area has a search bar and filters for TIDSPERIOD (17-11), ZON (Demo), HÄNDELSE (Alla), and UTFÖRT AV (Alla). Below the filters, there's an 'Exportera till Excel' button and a pagination bar showing 'Visar 1 till 25 av totalt 65 rader' with page numbers 1, 2, 3, and 'Nästa'. The table below lists events with columns: Tidpunkt, Händelse, Utrustning, Tillstånd, Zon, Utfört av, Behandlingstid, and Varning. The second row is highlighted, and a red circle highlights a dropdown arrow next to its 'Tidpunkt' (2023-11-24 11:13). The last row has a red circle around the '1/1' indicator in the 'Varning' column.

Tidpunkt	Händelse	Utrustning	Tillstånd	Zon	Utfört av	Behandlingstid	Varning
> 2023-11-24 11:13	Vandringslarm	Tillsynssensor LGH 1	Av / inaktiv - Hanteras - Tillstede på sone	LGH 1	Rebecka Karlsson	01:45:17	Ingen
2023-11-24 11:13	Fall	Tillsynssensor LGH 1	Av / inaktiv - Hanteras - Tillstede på sone	LGH 1	Rebecka Karlsson	00:00:58	Ingen
2023-11-24 11:13		Tillsynssensor LGH 1	Aktiv - Hanteras - Tillstede på sone	LGH 1	Rebecka Karlsson	00:00:34	Ingen
2023-11-24 11:12		Tillsynssensor LGH 1	Aktiv - Besvarad	LGH 1	Rebecka Karlsson	00:00:15	1/1

För att se mer ingående information kring en händelse kan man klicka på > och sen på de blåa siffrorna (i detta fall 1/1). Siffrorna 1/1 visar hur många som mottagit larmet och klickar man på siffran ser man vilka.

SKÖTESELRÅD VID RENGÖRING

Tänk på produkterna som vilken elektronik som helst, t.ex. en TV.

Rörelselarm, RoomMate, Safemate, GPS-klocka, Minifinder, rumspanelen, larmtavlan, talenheten, passagelarmet: Dessa produkter är inte vattentäta. Tvättas av med en fuktig trasa med ljummet vatten och lite tvål eller diskmedel. Ej vattentät. Det får inte komma väta i den.

NFC-taggen: är vattentät men rengörs enklast genom att torkas av med en fuktig trasa med lite diskmedel.

Patientklockan: Tvättas av med ljummet vatten på ett papper. Sprita väldigt sällan då spriten kan förstöra plasten men om den måste spritas av så torka då torrt direkt efteråt.



BEHÖVER NI HJÄLP?

Kontakta Sensio support:

support@sensiocare.se

077-44 44 100 dagtid helgfria vardagar

Övriga tider kopplas samtalet till Sensios beredskap för systemkritiska frågor eller för kunder med särskilda supportavtal.



TACK!

Frågor?

